

ADOTTARE LA PROCEDURA, PREFERIBILMENTE IN DUE, L'UNO DI FRONTE ALL'ALTRO

PREDISPORRE IL MATERIALE NECESSARIO COLLOCANDOLO IN SEQUENZA SU UNA SUPERFICIE PULITA

RIMUOVERE ANELLI E MONILI, LEGARE I CAPELLI LUNGI ALL'ALTEZZA DELLA NUCA

EFFETTUARE MOVIMENTI CONTROLLATI E NON INCROCIARE MAI BRACCIA E GAMBE



1 IGIENIZZARE LE MANI



2 INDOSSARE I GAMBALI (SE NECESSARI)




3 IGIENIZZARE LE MANI



4 INDOSSARE IL PRIMO PAIO DI GUANTI



5 INFILARE LA TUTA SOPRA I GAMBALI,
SOLLEVARLA SULLE SPALLE E INFILARE LE BRACCIA
LASCIANDO IL CAPPuccio ALL'INTERNO
LA MANICA DELLA TUTA DEVE COPRIRE I POLSI
E PARTE DEI GUANTI

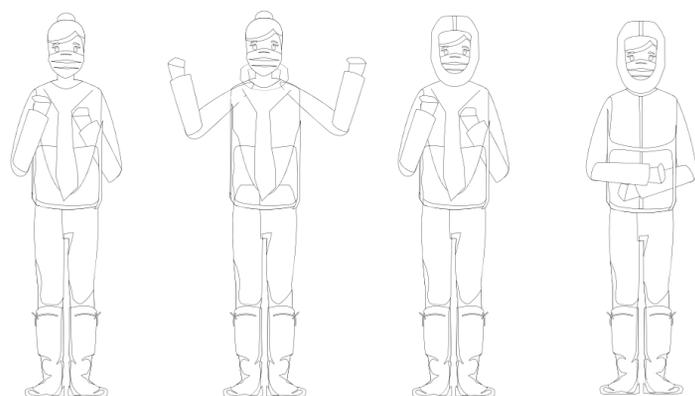

6 CHIUDERE LA LAMPO DELLA TUTA
OPPURE CHIUDERLA FINO ALLA ZONA PETTORALE

7 INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 INCROCIANDO GLI ELASTICI DIETRO ALLA TESTA
E MODELLARE LO STRINGINASO PER CONFERIRE TENUTA AL DISPOSITIVO



8 ALZARE IL CAPPuccio DELLA TUTA ACCERTANDOSI CHE I CAPELLI
SIANO COMPLETAMENTE CONTENUTI AL SUO INTERNO

9 CHIUDERE COMPLETAMENTE LA CERNIERA SINO A FINE CORSA,
TUTTO IL VOLTO DEVE ESSERE COPERTO NON UTILIZZARE LE EVENTUALI PARTI ADESIVE
(FISSARE LA LINGUETTA ADESIVA DEL COLLETTO ALL'ALTEZZA DELLA CLAVICOLA
DESTRA, OVE PRESENTE, SOLO SE COSTITUISCE L'UNICA MODALITÀ DI CHIUSURA)

10 INDOSSARE LO SCHERMO FACCIALE




11 INDOSSARE IL SECONDO PAIO DI GUANTI
PER RICOPRIRE IL POLSINO DELLA TUTA



OPPURE

12 INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2
INDOSSARE MASCHERINA CON VISIERA O OCCHIALI
E MASCHERINA CHIRURGICA
INDOSSARE LA CUFFIA

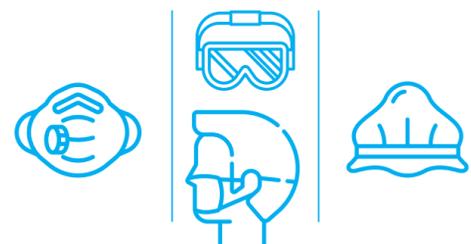

13 INDOSSARE IL SECONDO PAIO DI GUANTI
PER RICOPRIRE IL POLSINO DELLA TUTA



VESTIZIONE TUTA INTEGRALE CON CAPPuccio O CUFFIA

SEQUENZA DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE IN AMBIENTI COVID-19